

SOL-GUARD™ Säkerhetsspruta och insulinspruta med fast kanyl

Produkt Specifikation

CE marked

SOL-GUARD™ Säkerhetsspruta med fast kanyl

Artikelnummer	Volym	Gauge	Ytterdiameter (mm)	Längd (mm)	Längd (inch)
2102215SG	1 ml	22 G	0.7 mm	40 mm	1 1/2"
2000345G	1 ml	25 G	0.5 mm	16 mm	1"
200018SG	1 ml	25 G	0.5 mm	25 mm	5/8"
200019SG	1 ml	27 G	0.4 mm	12.5 mm	1/2"
200067SG	1 ml	28 G	0.3 mm	12.5 mm	1/2"
2152215SG	1.5 ml	22 G	0.7 mm	12.5 mm	1 1/2"

SOL-GUARD™ Insulinspruta




Artikelnummer	Volym	Gauge	Ytterdiameter (mm)	Längd (mm)	Längd (inch)
2000035G	0.3 ml	29 G	0.33 mm	12.5 mm	1/2"
2331516SG	0.3 ml	31 G	0.25 mm	8 mm	5/16"
233105SG	0.3 ml	31 G	0.25 mm	12.5 mm	1/2"
2531516SG	0.5 ml	31 G	0.25 mm	8 mm	5/16"
200017SG	1 ml	29 G	0.33 mm	12.5 mm	1/2"
200091SG	1 ml	31 G	0.25 mm	8 mm	5/16"

Avdelningsförpackning: 100 st Transportförpackning: 800 st

SOL-MILLENNIUM®
Building a healthier tomorrow

Sol-Millennium Europe Sp. z o.o.
Twarda 18, PL-00105 Warsaw
T: +48 22 202 67 23
F: +48 22 202 67 19
www.sol-m.com

SOL-GUARD™ Säkerhetsspruta och insulinspruta med fast kanyl

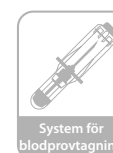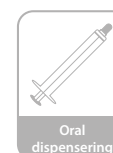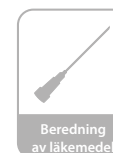

SOL-MILLENNIUM®
Building a healthier tomorrow

SOL-GUARD™ Säkerhetsspruta och insulinspruta med fast kanyl

SOL-GUARD™ är en säkerhetskonsruerad spruta med fast kanyl för varierande typer av injektioner.

Den är konstruerad för att **reducera stickskador hos vårdpersonal vid hantering av läkemedel och vid injektion.**



- **Transparent skydd, som man håller i ett enkelt och säkert grepp** - skydd under transport.

- **Transport Position** - Inget "av och på" med säkerhetsskyddet efter dosering.

- **Lågt "Dead Space"** - reducerar läkemedelsåtgången.

- **Klara och tydliga graderingar.**

Instruktioner för användning



Drag upp läkemedlet enligt gällande ordination.

För säkerhetsskyddet över hela kanylen tills det hörs ett klick. Detta försäkrar att säkerhetsskyddet sitter på plats för att transporteras färdigfylld till patienten.



För tillbaka säkerhetsskyddet tills det når ursprungspositionen och ge därefter injektionen enligt gällande riktlinjer.



Omedelbart efter injektion, för säkerhetsskyddet framåt tills ett klick hörs. För att låsa i detta säkra läge, vrid säkerhetsskyddet åt något håll tills det tar stopp och ett klick hörs.

Sprutan går nu inte att återanvända.