

GlucoMen Areo överför trådlöst blodsockervärden med sk Near Field Communication (NFC). Det är en överföringsstandard för kontaktlöst utbyte av data över korta avstånd (< 1 cm).

Tillverkare som stödjer NFC: Samsung, Sony, HTC, LG, Google, Nokia, Philips, Huawei, m.fl. Apple iPhone stödjer inte NFC utan kräver att BT-Device används

Detta behöver du:



En GlucoMen Areo blodsockermätare



En android smartphone

GlucoMen[®] areo

Förberedelser

Aktivera NFC på din Areo
(endast första gången)

Håll in "M"-knappen
till det står "SET"



Tryck på pil-
knapparna tills
N)) blinkar



Tryck på "M"-
knappen så att
"On" blinkar

Tryck på "M" igen
för att bekräfta



Aktivera NFC på din Smartphone

Gå in i "Inställningar"

Leta upp "NFC"
och "Aktivera"



Starta din app

Här GlucoLog Lite



OBS! Detta moment
är olika i olika appar

Tryck på symbolen
för "hämta data"



Överföring av data

För ihop rygg mot rygg
-tills du hör ett pip




Funkar även
med mätaren
i väskan!



När "End" visas
är det klart!



På www.diabetesappar.se kan du se vilka appar som stödjer **GlucoMen Areo**. Diabetesappar.se är en website framtagen i samarbete med svensk vårdpersonal och svenska appleleverantörer för att underlätta vardagen för både patienter och deras kontakter inom vården.

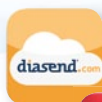

Instruktionsfilm på www.areo.nu
Gilla GlucoMen på Facebook
shop.menariniagnostics.se
www.diabetesappar.se



A.MENARINI
diagnostics